

## Instrucciones de uso BEREG-KIT orina en caja de poliestireno

### El BEREG-KIT

- Cada BEREG-KIT viene embalado individualmente en una caja de poliestireno y sellado con un precinto de seguridad adhesivo de color lila.
- Cada BEREG-KIT contiene dos frascos vidrio, uno A naranja y otro B azul. Ambos están precintados con una tapa de seguridad y una banda retráctil. Cada uno de los siguientes componentes del BEREG-KIT está numerado de forma idéntica: Caja de poliestireno, frascos y tapones de seguridad.
- En cada kit encontrarán 2 bolsas de plástico impermeables con material absorbente para el transporte al laboratorio (conforme a las directivas IATA DGR).
- La caja de poliestireno se puede volver a cerrar con la cinta adhesiva transparente.



### Antes del uso

- Asegúrese de que el kit, la banda retráctil de seguridad y los precintos de los frascos estén intactos y sin manipular.
- Cerciórese de que los números de todos los componentes del kit sean idénticos:
  - frascos
  - tapas de seguridad
  - caja de poliestireno y las etiquetas pequeñas (si las hubiere)




### Tapón de seguridad

Asegúrese de que estén todos los componentes del tapón:

- tapón negro
- resorte de acero
- anilla metálica gris



### Anilla roja

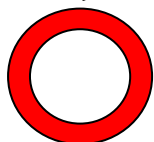

**ATENCIÓN: Importante !!!**  
Retire la anilla de plástico rojo antes de cerrar.



### Nivel de llenado

Las líneas grabadas con láser en los frascos de vidrio muestran los siguientes niveles:

- 60 ml: frasco A naranja
- 30 ml: frasco B azul

Cantidad máxima de llenado = aprox. 90 ml; no rebase el borde del frasco (recuerde que el líquido se expande cuando se congela).



### Precinto provisional

En caso de que no se disponga de suficiente orina, el precinto provisional sirve para cerrar la muestra temporalmente. Para el BEREG-KIT embalado en una caja de polistereno, se pueden usar todos losprecintos provisionales.

## Manejo del BEREG-KIT

- En cuanto tenga suficiente orina (conforme a las normas WADA IST), reparta las muestras en los frascos A y B.
- El recipiente de orina presenta una escala desde 10ml hasta 180 ml con una marca adicional de 90 ml.
- Bajo la supervisión y dirección del controlador de doping el atleta debe:
  - Controlar que los números de cada uno de los elementos sean idénticos.
  - Retirar la anilla de plástico rojo que impide el cierre del frasco involuntariamente.
  - Repartir la orina en los frascos A y B conforme a las indicaciones.
  - Cerrar los frascos presionando ligeramente y girando en el sentido de las agujas del reloj (al girar escuchará un clic). Gire lo máximo posible. Atención: no aplique demasiada fuerza.
- El controlador de doping debe animar al atleta:
  - Girar la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj para garantizar que el kit esté bien cerrado (como método de control se puede usar la barra indicadora)
  - Asegurarse de que al levantar el envase con la tapa no se abra.
  - Poner el frasco boca abajo un instante para cerciorarse de que esté herméticamente cerrado
- Para asegurarse de que el BEREG-KIT esté correctamente cerrado, el controlador de doping debería ejecutar los mismos pasos como medida de control.



## Preparativos para el transporte al laboratorio

- Para cumplir las normas de embalaje del IATA DGR sobre "exempt human specimens" cada kit cuenta con 2 bolsas de plástico impermeables con material absorbente para el envío posterior de los frascos.
- Cada frasco precintado debe meterse en una de las bolsas de plástico adjuntas (asegúrese de que el material absorbente esté en la bolsa).
- Retire la cinta adhesiva de la bolsa. Para minimizar el aire dentro de la bolsa, pase la mano por la bolsa hacia la parte superior y ciérrela de forma segura y estanca al aire.
- Coloque ahora en la caja de poliestireno los dos frascos embolsados, precintados y estancos dentro de las bolsas de plástico y cierre la caja.



El fabricante no se hace responsable de un manejo impropio del BEREG-KIT ni por un uso diferente al indicado en las instrucciones y la información del producto.

Lea detenidamente la nota de color rosa que se encuentra en la caja de poliestireno. Tenga presente que todas las instrucciones anteriores a estas ya no tienen validez.

La última versión de las instrucciones de uso está en nuestra página web: [www.berlinger.ch](http://www.berlinger.ch)