

Mode d'emploi BEREG-KIT small single (Pour prélèvement sanguin "screening" tests)

Le BEREG-KIT small single


- Chaque BEREG-KIT small single est emballé individuellement dans une boîte en polystyrène expansé ou un sachet de sécurité. En outre, le flacon est scellé avec un film thermo rétractable.
- Chaque élément du BEREG-KIT small single est numéroté (le flacon, le bouchon de sécurité, les 6 petites étiquettes ainsi que la boîte en polystyrène expansé/le sachet de sécurité). Assurez-vous que tous les numéros soient identiques!
- Vous trouverez dans chaque kit, un sachet en plastique étanche avec un coussin absorbant pour le transport au laboratoire (conformément aux directives DGR de l'IATA).
- Veuillez vérifier que tous les composants du bouchon soient complets:
 - bouchon noir
 - ressort en acier
 - anneau métallique gris



emballé dans une boîte polystyrène expansé




ou emballé dans un sachet sécurisé

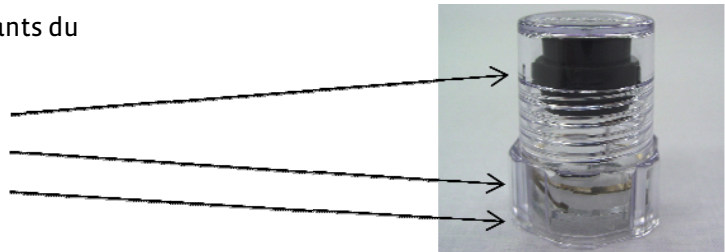


Contenu et propriétés

- La boîte en polystyrène expansé / sachet de sécurité contient:
 - 1 flacon estampé avec un numéro de couleur noire
 - 1 bouchon de sécurité avec le même numéro que celui du flacon (estampé en blanc)
 - 6 petites étiquettes avec le même numéro et code-barres
 - 1 sachet en plastique étanche avec un coussin absorbant une pièce d'absorbante
 - le mode d'emploi du BEREG-KIT small single

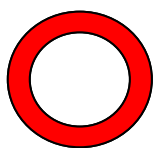

Attention important!!!

Veuillez ôter l'anneau rouge avant fermeture

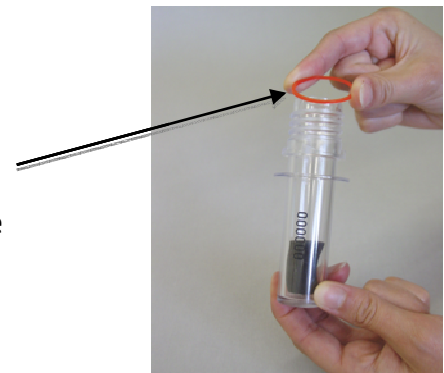

voir au verso

Fermeture du BEREG-KIT small single

- Le BCO doit procéder selon les directives WADA de juin 2008 pour effectuer les prélèvements de sang.
- Une fois que la prise de sang est terminée, l'athlète doit exécuter les mesures suivantes sous la surveillance du BCO et de ses instructions :
 - Vérifier que tous les numéros de chaque élément soient identiques.
 - Enlever l'anneau rouge (qui évite toute fermeture accidentelle avant utilisation).
 - Mettre l'ampoule dans le flacon.
 - Visser le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre en appuyant vers le bas avec une légère pression (vous devez entendre une série de clics).
 - Tourner le bouchon jusqu'à ce qu'il ne tourne plus. Attention: ne tournez pas avec trop de force.
- Le BCO doit inviter l'athlète à :
 - Essayer de tourner le bouchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour vérifier que le bouchon soit bien fermé.
 - Essayer de retirer le bouchon pour vérifier que celui-ci ne peut-être enlevé.
- Le BCO doit effectuer les mêmes étapes de contrôle que l'athlète pour s'assurer que le BEREG-KIT small single soit bien fermé.



Transport au laboratoire

- Afin de respecter les instructions d'emballage DGR de l'IATA pour les "exempt human specimens", le BEREG-KIT small single contient un sachet en plastique étanche avec un coussin absorbant
- Mettez le flacon fermé dans le sachet étanche, en veillant à ce que le coussin absorbant s'y trouve toujours.
- Ôtez la languette du ruban adhésif et fermez le sachet de façon hermétique (assurez-vous de chasser un maximum d'air avant la fermeture du sachet).
- Ajoutez au kit tous les formulaires nécessaires.
- Pour l'envoi au laboratoire, placez le kit dans le sachet ou la boîte prévu(e) à cet effet. Les échantillons de sang devraient être transportés dans des conditions de froid. Vérifiez que les températures et les conditions prescrites pour le transport soient respectées (selon les directives pour le prélèvement des échantillons de sang, directives WADA de juin 2008, Chapitre 5.14).



Tous les tests du produit ont été effectués avec des ampoules (liste disponible sur demande) du fabricant BD (Becton Dickinson; www.bd.com). Pour l'utilisation d'autres ampoules, veuillez effectuer vos propres tests du produit.

Le fabricant ne peut être tenu responsable pour une utilisation inadéquate du BEREG-KIT small single et pour une application autre que celle donnée dans les règles d'applications ou les informations

Veuillez lire attentivement la notice rose qui se trouve dans la boîte en polystyrène expansé/dans le sachet de sécurité.

Veuillez prendre note que tous les modes d'emploi publiés ultérieurement ne sont plus valables.

La version la plus récente de ce mode d'emploi se trouve sur notre site Internet : www.berlinger.ch