

Scellé intermédiaire version Italy

Le scellé intermédiaire permet de sceller temporairement l'échantillon, dans le cas où l'athlète ne peut donner assez d'urine (selon les normes internationales de test AMA IST).

Contenu

- 1 bande adhésive de sécurité numérotée
- 1 gobelet transparent échelonné
- 1 couvercle blanc avec bande d'arrachage

Mode d'emploi

- Remplissez le gobelet avec l'urine disponible et placez le couvercle blanc dessus.
- Fermez le gobelet en appuyant avec la paume de la main sur le couvercle blanc de façon à ce qu'il ne puisse être rouvert.
- Scellez alors temporairement le gobelet avec la bande adhésive de sécurité numérotée, en la collant par dessus le couvercle et le gobelet (comme illustré).
- Dès que l'athlète peut à nouveau donner de l'urine, ôtez la bande adhésive de sécurité et ouvrez le couvercle en tirant sur la bande d'arrachage (comme illustré).

Veillez vérifier avant l'ouverture du scellé que la bande adhésive de sécurité et la bande d'arrachage sont encore intactes.



Le fabricant ne peut être tenu responsable pour une utilisation inadéquate du scellé intermédiaire version Italy et pour une application autre que celle décrite dans les instructions et informations sur le produit.
Veillez prendre note que tous les modes d'emploi parus avant celui-ci ne sont plus valables !