

Mode d'emploi pour le séparateur à la main

1. Mettez la bouteille en verre ou le récipient en plastique dans le gobelet. (pour la bouteille en verre utilisez le gobelet blanc, pour le récipient en plastique le gobelet gris)



2. Placez le couvercle en métal sur le bouchon de sécurité.



3. Battez 2 ou 3 fois avec un grand marteau sur le couvercle en métal. (attention, ne battez pas trop fort)

4. Maintenant on peut enlever le couvercle en métal et on peut ouvrir le bouchon séparé. (Pour protéger vos mains contre blessures, utilisez l'ouvre-bocaux)

